



Produktdatablad

Munnbind med øreelastikker, Type IIR, Zhende, varenr. 1999902596



Beskrivelse:

Ansiktsmaske med myke og sterke øreelastikker og neseclips som sørger for god passform og gjør den behagelig å ha på. Masken har lav respirasjonsmotstand og høy bakteriefiltrering. Ansiktsmasken har ultralydsømmer og er steril. Materiale: PP, spandex og aluminium.

Anvendelse:

Munnbindet anbefales for bruk av helsepersonell i operasjonsrom eller i miljøer med lignende hygienekrav for å redusere krysskontaminering. Pasienten og miljøet er beskyttet mot infeksjon og brukeren mot sprut og spray med et trykk på 120 mmHg. Form neseclipsen og ta masken på ansiktet, og sørg for å dekke til nese og munn. Fest ørestrikkene bak ørene. Munnbindet påføres med den fargede siden ut og skal ligge tett mot ansiktet. Pass på å brette munnbindet helt ut. Øreelastikkene gjør det enkelt å ha på og ta av.

Egnet for langvarig bruk; men hvis masken er forurenset / uren, bør den skiftes. Videre bør nasjonale retningslinjer for helsevesenet følges.

CE

CE-merket i henhold til EU-forskriften for medisinsk utstyr (MDR) 2017/745 vedlegg VIII, klasse 1.

Type IIR godkjent i henhold til EN 14683: 2019.

Test og krav til medisinske ansiktsmasker

EN 14683:2019			
Test	Type 1 ^a	Type II	Type IIR
Bakteriell filtreringseffektivitet (BFE), (%)	≥ 95	≥ 98	≥ 98
Respirasjonsmotstand (Pa/cm ²)	< 29,4	< 29,4	< 60
Væskegjennomtrengning (kPa)	Kreves ikke	Kreves ikke	≥ 16,0
Mikrobiell renhet (CFU / g)	≤ 30	≤ 30	≤ 30

a. Medisinske munnbind av type I skal bare brukes på pasienter og andre personer for å redusere risikoen for å spre infeksjoner i tilfelle en epidemi eller pandemi. Type I-masker er ikke ment å brukes av helsepersonell eller sykehuspersonale i et operasjonsrom eller et annet medisinsk område med lignende krav.



Produktdatablad

Forpakning:

Innerpakke: Dispenserboks Transportkartong: Kartong

Oppbevaringsinstruksjoner, holdbarhet og avhending av emballasje

Oppbevaringsinstruksjoner: Oppbevares tørt, ved romtemperatur og ikke i direkte sollys.

Holdbarhet - uåpnet: 3 år


Avhending av emballasje: Kan brukes på nytt eller brennesVarenr

Varenr.	Produkt	Str.	Kvalitet	Stk. pr. pk/kl
1999902596	Munnbind med øreelastikker, Type IIR	17x18 cm	3-lags	50/2000

Bruerveiledning:



1 Rengjør hendene før du tar på munnbind.

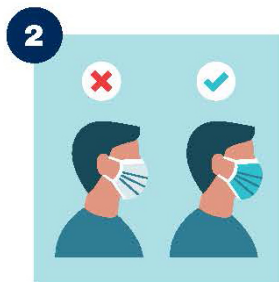

2 Sørg for at munnbindets utside vender ut, som regel er denne farget.



3 Press nesebøylen over neseryggen.



4 Fest elastikk-båndene bak ørene.



5 Plasser munnbindet over nese og munn. Munnbindet skal ligge tett mot ansiktet.



6 Press nesebøylen ned slik at den sitter godt over nesen.



7 Fjern munnbindet ved å ta tak i elastikkbåndene. Unngå å berøre selve munnbindet.



8 Kast det brukte munnbindet i en søppelbøtte med en gang du tar det av.



Produktdatablad

Alternativ

For å beskytte brukeren mot sprut anbefaler vi Type II Munnbind.

Se alternativene nedenfor:

Varenr.	Produkt
1000010123	Munnbind med øreelastikker, Type IIR

ANSC / 20200723